



# Gamme de chariots Getinge Smart

Flux ergonomique d'articles stériles



Le chariot avec des options Smart est équipé de commandes intégrées dans la poignée pour que l'utilisateur puisse le manœuvrer en toute sécurité, sans le lâcher.

# L'intelligence dans le mouvement

## Des utilisateurs différents, des positions différentes

Le concept Getinge Smart - un nouveau niveau de confort

### **Un concept ergonomique**

Les systèmes de chargement et de distribution représentent une part essentielle du flux de travail dans les salles d'opération et les unités de stérilisation. Getinge Smart est une ligne de chariots conçus avec soin qui portent le chargement, le déchargement et la distribution des instruments à un tout autre niveau, à la fois en termes d'ergonomie et de fonctionnalité.

La gamme de chariots repose sur un concept ergonomique dédié au chargement et à la distribution efficaces des articles avec un niveau maximal d'hygiène et de confort. Getinge Smart est synonyme de fonctionnalités de pointe jusque

dans les moindres détails, depuis le choix des matériaux et des surfaces jusqu'à la manœuvrabilité, la propreté et l'ergonomie.

Les chariots Getinge Smart peuvent être équipés d'une fonction de chargement semi-automatique qui réduit la manipulation des articles lors du chargement et du déchargement. Manipuler les chariots est un vrai plaisir. La fonction Power Drive est une option qui permet à l'utilisateur de manœuvrer le chariot à l'emplacement souhaité avec peu d'effort. Ces fonctionnalités en option assurent une bonne ergonomie et procurent à votre personnel les meilleures conditions de travail possibles.

# Chariots Smart de chargement/déchargement

- ergonomiques dans les moindres détails

L'ergonomie, c'est faire en sorte que les personnes soient capables de travailler sans effort, tension ou lésion.

Il s'agit de déplacer aisément les charges lourdes.

Il s'agit de faire preuve de souplesse et de comprendre que les gens n'ont pas tous la même taille, la même force, et n'effectuent pas tous les mêmes tâches. Nos chariots\* de chargement et déchargement sont basés sur un concept ergonomique intelligent (Smart) qui aborde le chargement et la distribution dans les moindres détails.

Les chariots de chargement Smart sans « options Smart » peuvent être lavés et désinfectés en cabine de lavage Getinge 9100 (à l'exception du chariot pour les stérilisateurs Getinge HS33).

## Chariots Smart à hauteur fixe

- Facile à manœuvrer
- Facile à nettoyer
- Ergonomique



Chariot à hauteur fixe Smart pour laveurs-désinfecteurs



Chariot à hauteur fixe Smart pour stérilisateurs

\*Les conteneurs, supports à étagères et systèmes de transfert des paniers doivent être commandés séparément.

# Options Smart

Le chariot avec des options Smart est équipé de commandes intégrées dans la poignée pour que l'utilisateur puisse le manœuvrer en toute sécurité, sans le lâcher.

## **Chargement semi-automatique (SAL)**

Pour un chargement et un déchargement automatiques des paniers du stérilisateur, activés par la commande intégrée dans la poignée.

## **Chariots Smart à hauteur variable (AHT)**

Se règle à des hauteurs de travail ergonomiques pour réduire les tensions musculaires chez tous les utilisateurs.

## **Motorisation (PD)**

Réduit sensiblement les tensions musculaires en permettant de déplacer et de manœuvrer les chariots à l'emplacement souhaité avec peu d'effort.



Chariot à hauteur réglable Smart pour laveurs-désinfecteurs



Chariot à hauteur réglable Smart pour stérilisateurs

# Chariots Smart de chargement/déchargement

## Informations techniques

Chariot de chargement pour panier

- Stérilisateur Getinge HS33

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.
HS33-60L	564710370	Smart FHT HS33-60L	30 kg
HS33-100L	564710372	Smart FHT HS33-100L	30 kg



Chariot de chargement pour support à étagères

- Stérilisateur Getinge HS5510

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.
HS5510	564654270	LT FIX POUR 5510	130 kg



Chariot de chargement pour support à étagères

- Stérilisateur Getinge 66 et 67

### Chariot charge complète

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.	Longueur du support
HS/GE 6606	6020720670	Smart FHT 66/67 x 06/13HL	200 kg	640 mm
HS/GE 6610, GSS6710	6020720672	Smart FHT 66/67 x 10/20HL	200 kg	990 mm
HS/GE 6613, GSS6713	6020720674	Smart FHT 66/67 x 13	200 kg	1 290 mm
HS/GE 6617, GSS6717	6020720676	Smart FHT 66/67 x 17	200 kg	1 680 mm



### Chariot demi-charge – Deux chariots pour une charge complète de stérilisateur

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.	Longueur du support
HS/GE 6613, GSS6713	6020720670	Smart FHT 66/67 x 06/13HL	200 kg	640 mm
HS/GE 6617, GSS6717	6020720672	Smart FHT 66/67 x 10/20HL	200 kg	990 mm
HS/GE 6620, GSS6720	6020720672	Smart FHT 66/67 x 10/20HL	200 kg	990 mm

Les chariots\* de chargement/déchargement Getinge Smart vous donnent la possibilité d'opter pour une solution qui répond vraiment à vos besoins dans chaque situation.



## Chariot de chargement pour support à étagères - Stérilisateur Getinge 66 et 67

### Chariot charge complète avec option Smart

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.	Longueur du support	Options Smart		
					AHT	SAL	PD
HS/GE 6610 GSS6710	6020721472	Smart FHT SAL 66/67 x 10	200 kg	990 mm	-	•	-
HS/GE 6613 GSS6713	6020721474	Smart FHT SAL 66/67 x 13	200 kg	1 290 mm	-	•	-
HS/GE 6610 GSS6710	6020723072	Smart AHT 66/67 x 10	200 kg	990 mm	•	-	-
HS/GE 6613 GSS6713	6020723074	Smart AHT 66/67 x 13	200 kg	1 290 mm	•	-	-
HS/GE 6617 GSS6717	6020723076	Smart AHT 66/67 x 17	200 kg	1 680 mm	•	-	-
HS/GE 6610 GSS6710	6020724072	Smart AHT SAL 6 x 10	200 kg	990 mm	•	•	-
HS/GE 6613 GSS6713	6020724074	Smart AHT SAL 6 x 13	200 kg	1 290 mm	•	•	-
HS/GE 6610 GSS6710	6020724572	Smart AHT PD 6 x 10	200 kg	990 mm	•	-	•
HS/GE 6613 GSS6713	6020724574	Smart AHT PD 6 x 13	200 kg	1 290 mm	•	-	•
HS/GE 6610 GSS6710	6020725072	Smart AHT SAL PD 6 x 10	200 kg	990 mm	•	•	•
HS/GE 6613 GSS6713	6020725074	Smart AHT SAL PD 6 x 13	200 kg	1 290 mm	•	•	•

### Chariot demi-charge avec option Smart – Deux chariots pour une charge complète de stérilisateur

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.	Longueur du support	Options Smart		
					AHT	SAL	PD
HS/GE 6617, GSS6717	6020723072	Smart AHT 66/67 x 10	200 kg	990 mm	•	-	-
HS/GE 6617, GSS6717	6020724572	Smart AHT PD 6 x 10	200 kg	990 mm	•	-	•
HS/GE 6620, GSS6720	6020723072	Smart AHT 66/67 x 10	200 kg	990 mm	•	-	-
HS/GE 6620, GSS6720	6020724572	Smart AHT PD 6 x 10	200 kg	990 mm	•	-	•

### Uniquement pour un arrimage à un système de chargement automatique, pour une empreinte au sol plus réduite

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.	Longueur du support	Options Smart		
					AHT	SAL	PD
HS/GE 6617 GSS6717	6020723176	Smart AHT 66/67 x 17 HL UN-/L	200 kg	840 mm	•	-	-

\*Les conteneurs, supports à étagères et systèmes de transfert des paniers doivent être commandés séparément.

## Chariot pour chargement par transfert des paniers (BF) - Stérilisateur Getinge 66 et 67

Le chariot pour chargement par transfert des paniers permet de charger manuellement les paniers dans le stérilisateur.

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.	support transfert des paniers
HS/GE 6606	6020720670	Smart FHT 66/67 x 06/13HL	125 kg	564613070CE
HS/GE 6610, GSS6710	6020720672	Smart FHT 66/67 x 10/20HL	125 kg	564613270CE
HS/GE 6613, GSS6713	6020720674	Smart FHT 66/67 x 13	125 kg	564613470CE
HS/GE 6617, GSS6717	6020720676	Smart FHT 66/67x17	125 kg	564613670CE



### Avec option Smart

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.	support transfert des paniers	Options Smart		
					AHT	SAL	PD
HS/GE 6610, GSS6710	6020723072	Smart AHT 66/67 x 10	125 kg	564613270CE	●	-	-
HS/GE 6610, GSS6710	6020724572	Smart AHT PD 6 x 10	125 kg	564613270CE	●	-	●
HS/GE 6613, GSS6713	6020723074	Smart AHT 66/67 x 13	125 kg	564613470CE	●	-	-
HS/GE 6613, GSS6713	6020724574	Smart AHT PD 6 x 13	125 kg	564613470CE	●	-	●
HS/GE 6617, GSS6717	6020723076	Smart AHT 66/67x17	125 kg	564613670CE	●	-	-

\* La capacité de charge est limitée à 125 kg.

## Chariot de chargement pour table de chargement/déchargement automatique de paniers - Stérilisateur Getinge 66 et 67

Le chariot de chargement est utilisé pour charger/décharger la table de chargement/déchargement automatique de paniers. Il est impossible de l'utiliser directement sur le stérilisateur.



### Avec option Smart

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.	Options Smart		
				AHT	SAL	PD
HS/GE 6610, GSS6710	6020727072	Smart AHT basket 66/67x10 UN-/L	200 kg	●	-	-
HS/GE 6613, GSS6713	6020727074	Smart AHT basket 66/67x13 UN-/L	200 kg	●	-	-





## Chariot de chargement pour paniers - Stérilisateur Getinge 610

Chariot Getinge pour support à étagères. Possibilité d'arrimage au stérilisateur.

### Chariot charge complète

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.	Longueur du support
GSS61010/61021	6023373272	Chariot de chargement Smart FHT 61010	250 kg	1 000 mm
GSS61014	6023373274	Chariot de chargement Smart FHT 61014	250 kg	1 360 mm



### Chariot demi-charge – Deux chariots pour une charge complète de stérilisateur

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.	Longueur du support
GSS61021	6023373272	Chariot de chargement Smart FHT 61021	250 kg	1 000 mm



## Chariots de chargement pour laveurs-désinfecteurs

Module de lavage Getinge.\*

Peut être utilisé avec les modèles 8666/8668/86T/88T/CM320

Laveurs-désinfecteurs et équipement de chargement pour Automation System 2.0.



Options Smart

### Chargement unisens avec option Smart

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.	AHT	SAL	PD
8666/8668/86T/88T/CM320	6020720271	Smart AHT WD 8666/8668/86T/88T/CM320	165 kg	•	-	-

### Chargement unisens

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.
8666/8668/86T/88T/CM320	6020720171	Smart FHT WD 8666/8668/86T/88T/CM320	165 kg



### Chargement double sens

Un stérilisateur	N° d'article	Description des produits	Charge max.
8666/8668/86T/88T/CM320	6020720172	Smart FHT WD DH 8666/8668/86T/88T/CM320	165 kg

\*Les modules de lavage doivent être commandés séparément.



# Chariots de distribution Smart

– pour un transport ergonomique et efficace

Les chariots de distribution Getinge Smart vous assurent toujours une distribution sûre et efficace. Le modèle à capot rigide protège les produits stériles de la poussière et des dommages. Le modèle de chariot ouvert vous offre un dispositif mobile pour les conteneurs et paniers SPRI.

## **Chariot de distribution Smart à capot rigide (DTHC)**

Dans cette armoire, les conteneurs à instruments et les paniers peuvent être regroupés avec les ustensiles, le linge, les consommables et le matériel d'anesthésie pour être transportés jusqu'à un service interne de salle d'opération, un hôpital ou un emplacement de stockage externe. Le capot rigide protège les ustensiles stérilisés de la poussière et des dommages pendant le transport.

- Un transport simple en toute sécurité
- Ergonomique
- Possibilité de nettoyage et de désinfection en cabine de lavage Getinge.



Les chariots de distribution Smart Getinge ont été conçus pour le transport ergonomique et efficace de paniers et/ou de conteneurs. Ils sont utilisés dans les zones de conditionnement des secteurs stériles et pour le transport entre les différentes zones sales de l'hôpital.



La porte s'ouvre à 260 degrés et se bloque en position ouverte, ce qui facilite le chargement et le déchargement. La poignée de la porte peut être équipée en option d'une serrure. Les supports d'étagères peuvent être déplacés, ce qui optimise l'utilisation de l'armoire.



Un maximum de cinq étagères peut être utilisé. Trois sont fournies en standard. Des étagères supplémentaires sont disponibles (en option) pour augmenter l'espace de stockage. Chaque étagère est fournie avec deux séparateurs maintenant les articles en place pendant le transport.



Pour faciliter les manœuvres, l'armoire est équipée de deux roues pivotantes verrouillables et de deux roues fixes. Elles font 160 mm de diamètre. Une broche et une barre sont disponibles en option pour permettre le remorquage.

### Chariot de distribution Smart à capot rigide (DTHC)

N° d'article	Capacité	Options (n° de référence)	Charge max.	Dimensions du chariot (L x l x h)
564719070	6 ou 8 SPRI/ISO haut* ou 15 DIN StU ½ taille**	564719071 étagère grillagée, 2 séparateurs compris 564719075 broche et barre de remorquage	145 kg	1286 x 699 x 1502 mm

\*SPRI haut : 585 x 395 x 195 mm ISO haut : 600 x 400 x 195 mm (pour 8 SPRI/ISO, commander une étagère supplémentaire)

\*\* DIN STU ½ taille : 575 x 280 x 135 mm



# Chariot de distribution ouvert Smart



## Chariot de distribution ouvert Smart (DTO)

Ce chariot est un dispositif de stockage mobile pour les conteneurs et paniers SPRI. La conception ouverte facilite la visualisation et la saisie des paquets individuels. Les étagères et les paniers sont bien fixés pour un transport sûr.

- Facilité de chargement et de déchargement
- Gain de place pour le stockage
- Silencieux et facile à manœuvrer
- Possibilité de nettoyage et de désinfection en cabine de lavage Getinge.



Le positionnement flexible des guides et des étagères optimise l'utilisation des chariots.



Les chariots peuvent être chargés et déchargés des deux côtés. Les étagères et les paniers peuvent être tirés à mi-course pour un accès plus facile.



Les roues pivotantes de haute qualité (dont deux verrouillables) facilitent les déplacements et les manœuvres, même à pleine charge.



**DTO double (étagères)**  
N° : 564718970



**DTO simple (mixte)**  
N° : 564718370



**DTO simple SPRI (5 hauts)**  
N° : 564718170  
(Paniers SPRI non compris)



**DTO simple (étagères)**  
N° : 564718570  
(Conteneur non compris)

**Les chariots de distribution ouverts Getinge Smart sont disponibles pour chaque modèle en version simple ou double :**

- Trois modèles configurés pour des charges standards. Fournis avec des guides pour paniers SPRI et des étagères pour conteneurs ou mixtes.
- Un modèle de base qui peut être configuré individuellement. Pour le modèle de base, les guides doivent être précisés et commandés séparément selon la configuration souhaitée : charge mixte d'étagères et/ou de paniers.

**Données techniques - Chariot de distribution ouvert Smart (DTO)**

**DTO simple**

Type de charge	N° d'article	Description des produits	Charge max.	Dimensions (L x l x h)
Paniers	564718170	DTO simple paniers SPRI, 10 bas ou 5 hauts	85 kg	736 x 429 x 1 577 mm
Mixte	564718370	DTO simple, 2 paniers SPRI hauts/3 étagères	85 kg	736 x 429 x 1 577 mm
Etagères	564718570	DTO simple, 5 étagères	85 kg	736 x 429 x 1 577 mm
Configuration libre	564718070	Base DTO simple sans guides	85 kg	736 x 429 x 1 577 mm

**DTO double**

Type de charge	N° d'article	Description des produits	Charge max.	Dimensions (L x l x h)
Paniers	564718770	DTO double SPRI, 20 bas ou 10 hauts	170 kg	1 416 x 429 x 1 577 mm
Mixte	564718870	DTO double, 4 paniers SPRI hauts/6 étagères	170 kg	1 416 x 429 x 1 577 mm
Etagères	564718970	DTO double, 10 étagères	170 kg	1 416 x 429 x 1 577 mm
Configuration libre	564718670	Base DTO double sans guides	170 kg	1 416 x 429 x 1 577 mm

**Options pour simple et double**

N° d'article	Description des produits	Charge max.	Dimensions (L x l x h)
564718171	Paire de guides panier SPRI	18 kg	30 x 425 x 50 mm
564718771	Paire de guides panier ISO	18 kg	30 x 425 x 50 mm
564718571	Paire de guides et étagère	18 kg	30 x 425 x 50 mm
564718470	Verrou de transport externe		
560181301	Support pour protections jetables		
560125070	Protections jetables transparentes, 50 unités/rouleau		
6003000052	Protection réutilisable pour DTO simple		
6003000053	Protection réutilisable pour DTO double		



Avec la ferme conviction que chaque personne et chaque communauté devraient avoir accès aux meilleurs soins possibles, Getinge fournit aux hôpitaux et aux institutions des sciences de la vie des produits et des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. La gamme de produits est destinée aux soins intensifs, aux procédures cardiovasculaires, aux blocs opératoires ainsi qu'aux services de retraitement stérile et des sciences de la vie. Getinge emploie plus de 10 000 personnes dans le monde entier et nos produits sont disponibles dans plus de 135 pays.

**Getinge Sterilization AB** · PO Box 69 · SE-305 05 Getinge · Sweden · +46 10 335 00 00 · [info@getinge.com](mailto:info@getinge.com)

Trouvez votre représentant commercial Getinge local sur le site :  
**Getinge France** · Immeuble Iliade 23 Avenue Carnot · 91300 Massy

[www.getinge.fr](http://www.getinge.fr)