

Beinhalter und Beinschalen für Steinschnittlage

Ein System für eine große Bandbreite an Patientengewichten

Die richtige Positionierung von Beinen und Füßen ist für den Patientenkomfort und einen effektiven Zugang zur Operationsstelle in der Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie von entscheidender Bedeutung. Unser Beinhaltersystem kann mit zwei Varianten von Beinschalen verwendet werden, die mit bis zu 160 oder 250 kg belastet werden können und sich dadurch für viele Patienten eignet.



Ein einzelnes Beinhalterpaar, um Ihre Investition zu minimieren und Zeit zwischen den Operationen zu sparen




Standard-Beinschalen (schwarz) für Patienten bis 160 kg

Patientenkomfort: Mithilfe der Klingenaufnahme kann das Bein des Patienten näher am Rotationspunkt der Hüfte gelagert werden. Das reduziert die Belastung für Patienten, die einen eingeschränkten Bewegungsradius im Hüftgelenk haben. Die Beinschalen sind standardmäßig mit Seitenflügeln ausgestattet, um die Stabilität des Beins des Patienten zu verbessern und zu verhindern, dass das Bein nach außen wegrutscht.



Adipositas-Beinschalen (blau) für Patienten bis 250 kg

Sparen Sie Zeit: Der Beinhalter muss nicht zwischen den Operationen gewechselt werden. Verwenden Sie einfach die Beinschale, die dem Gewicht des Patienten entspricht. Dank der Click-in-Schnittstelle des Verriegelungssystems ist die Einrichtung schnell und einfach zu erledigen. Zwei Versionen von Beinschalen sind mit dem Beinhalter kompatibel. Sie sind farblich gekennzeichnet, um die Identifizierung zu erleichtern.

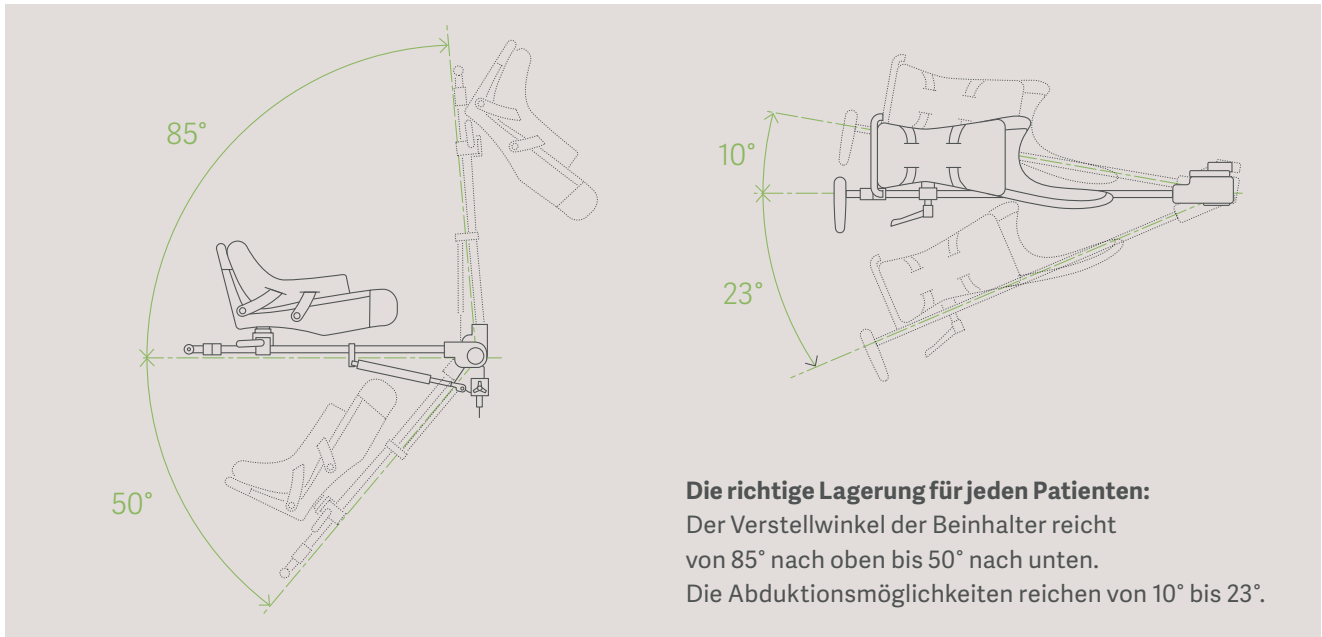

Die richtige Lagerung für jeden Patienten:
Der Verstellwinkel der Beinhalter reicht von 85° nach oben bis 50° nach unten.
Die Abduktionsmöglichkeiten reichen von 10° bis 23°.

Ein kompatibles System: Die Beinhalter sind mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Gleitschienen kompatibel.

Land	mm
EU	10 x 25
US	9,53 x 28,57
GB	6,35 x 31,75
Schweiz	10 x 30
Australien	6,35 x 38,1
Japan	9 x 32

Zubehörliste

Bezeichnung	Artikelnummer
Klemme mit Klingenaufnahme, Stück	1003.24A0
Beinhalter, Paar (inkl. 2x Klemmen)	1003.80A0
Beinschalen, Standard, Paar	1003.81A0
Beinschalen, Adipositas, Paar	1003.82A0

Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 (0)7222 932-0

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-1200 · info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG · Quellenstrasse 41b · 4310 Rheinfelden · Schweiz · +41 71 335 03 03 · info@getinge.ch

www.getinge.de

